

■ リカバロン 14000hi の場合



1. 次のような医療機器との併用は、影響を与える可能性があるので使用しないでください。

- (1) ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器。
- (2) 心電計などの装着形の医用電気機器。

2. 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている人は、使用しないでください。

3. 次のような医療機器との併用は、影響を与える可能性があるので使用しないでください。

- (1) 悪性しゅよう（腫瘍）のある人。
- (2) 心臓に障害のある人。
- (3) 妊娠初期の不安定期又は出産直後の人。
- (4) 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人。
- (5) 体温 38 °C以上（有熱期）の人。
 - 例 1 急性炎症症状 [けん（倦）怠感, 悪寒, 血圧変動など] の強い時期にある人。
 - 例 2 衰弱している人。
- (6) 安静を必要とする人。
- (7) せきつい（脊椎）の骨折, ねんざ（捻挫）, 肉離れなど, 急性 [とう（疼）痛性] 疾患の人。
- (8) 温度感覚喪失が認められる人。
- (9) 低温やけどをしたことのある人。
- (10) 高血圧の人
- (11) 不整脈のある人
- (12) 睡眠時無呼吸症の人
- (13) ぜん（喘）息の人

4. 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。

5. 使用しても効果が現れない場合には、医師または、専門家にご相談ください。

6. 周囲の人は、治療中の人に触れないでください。

7. 使用中の人は、周囲の人又は物に触れないでください。

8. 導子が濡れている場合には使用しないでください。

9. 金属繊維などの導電性物質を含む毛布と共に使用しないでください。

10. 一人用の家庭用医療機器です、複数の人が同時に使用しないでください。

11. 電床にて電位治療中は局部導子を併用しないでください。

12. 局部導子は、必ず治療を行なっている使用者自身で使用し、他のものがこれを保持しないでください。

13. 導子は、頭部又は皮膚疾患部には接触させないでください。

14. 使用方法は必ず取扱説明書を確認し、指示している方法で使用してください。

15. 子供には使用させないでください。(ただし、保護者、医師又は専門家の監督下で使用する場合は除く)、器体及び導子の上で遊ばせない、上に乗らせないでください。

16. 身体が自由が利かない人および幼児には使用させないでください。

17. 睡眠薬等を服用した人及びめいてい（酩酊）状態の人には使用させないでください。

18. 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。

19. 高温設定で長時間使用すると皮膚にやけどが生じる場合があります。

20. 使用しない部分の導子及び付属品は機器へ接続したり、人体へ接触したりしないでください。
