

## リカバロン 14000hi の場合



1. 心臓病と診断され、日常生活の過激な運動を制限されている人は使用しないでください。

---

2. 下記のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性があるので使用しないでください。

- ①ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
  - ②心電計などの装着形の医用電気機器
- 

3. 本器及び付属品の分解や改造をしないでください。

---

4. 次の方は、ご使用にあたって医師にご相談ください。

- ①悪性腫瘍（しゅよう）のある方
  - ②心臓に障害のある方
  - ③妊娠初期の不安定期または出産直後の方
  - ④体温が 38℃以上（有熱期）の方
    - （例1）急性炎症症状 [ 倦（けん）怠感、悪寒、血圧変動など ] の強い時期にある方
    - （例2）衰弱している方
  - ⑤安静を必要とする方
  - ⑥脊椎（せきつい）の骨折、捻挫（ねんざ）、肉離れなどの、急性 [ 疼（とう）痛性 ] 疾患の方
  - ⑦糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
  - ⑧温度感覚喪失が認められる方
  - ⑨低温やけどをしたことがある方
- 

5. 1 時間を超えて治療を行う場合、次の方は、ご使用にあたって医師にご相談ください。

- ①高血圧の方
  - ②不整脈のある方
  - ③睡眠時無呼吸症の方
  - ④ぜん（喘）息の方
- 

6. 身体に異常を感じたときには、使用を直ちに中止してください。

---

7. 周囲の人は治療中の人に触れないでください。

---

8. 治療中の人は周囲の人や物に触れないでください。

---

9. 電床マットや局部ペンローラー、温熱シートが濡れている場合には使用しないでください。

---

10. 金属繊維などの導電性物質を含む毛布とともに使用しないでください。

---

11. 一人用の家庭用医療機器です。複数の人が同時に使用しないでください。

---

12. 電床マットにて電位治療中は局部ペンローラーを併用しないでください。

---

13. 局部ペンローラーは、必ず治療を行っている使用者自身で使用し、他のものがこれを保持しないでください。

---

14. 電床マット、局部ペンローラーは頭部又は皮膚疾患部には接触させないでください。

---

15. 使用方法は必ず取扱説明書を確認し、指示している方法で使用してください。

---

16. 子供が使用する場合は、保護者、医師または専門家の付き添いが必要です。子供だけで使用させないでください。また、本器、電床マット及び局部ペンローラーで遊ばせたり、上に乗ったりさせないでください。

---

17. 乳幼児や身体の不自由な方には使用させないでください。

---

18. 睡眠薬を服用された方、及び、酩酊状態の方は使用しないでください。

---

19. 浴室等、水分や湿気の多い場所では使用しないでください。

---

20. 高温設定で長時間使用すると皮膚にやけどが生じる場合があります。

---

21. 使用しない部分の付属品は本器へ接続したり、人体へ接触したりしないでください。

---

22. 使用しても効果が表れない場合は、医師又は専門家に相談願います。

---